


Aggiornamento Firmware optaro® XL

Istruzioni

1. **Scarica** il file di aggiornamento dalla sezione Materiali della homepage Eschenbach utilizzando il tuo iPad:

[eschenbach-vision.com/it-IT/prodotti/i-nostri-prodotti/prodotti/optaror-xl-11-ipad-holder165341](https://www.eschenbach-vision.com/it-IT/prodotti/i-nostri-prodotti/prodotti/optaror-xl-11-ipad-holder165341)

2. Una volta scaricato, troverai il file **BRN** nella cartella **Download** sul tuo iPad.

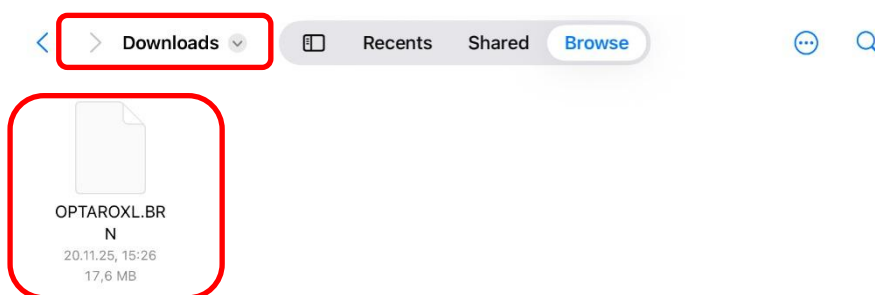


3. **Accendi** l'optaro® XL. Quando il LED di stato blu è acceso in modo continuo, tieni premuto il pulsante di aggiornamento sul retro del dispositivo (vedi segno rosso) per circa **5 secondi**, finché l'indicatore LED di connessione – situato vicino alla porta USB-C e accanto al pulsante di aggiornamento – non diventa **arancione**.



Finché l'indicatore **LED di connessione è arancione (o lampeggia)**, l'optaro® XL è in modalità aggiornamento e non può essere utilizzato normalmente. Se l'optaro® XL viene spento durante l'aggiornamento del firmware o se si preme il pulsante di reset, l'aggiornamento verrà interrotto e rimarrà in uso il vecchio firmware.


4. **Collega** l'optaro® XL e il tuo iPad utilizzando il cavo USB-C corto in dotazione.



5. **Apri** la cartella **File** sul tuo iPad , quindi apri la cartella **Download**. Il file BRN è memorizzato lì.
6. La posizione di archiviazione "**NO NAME**" viene visualizzata nella barra laterale dell'iPad. Sposta o copia il file BRN nella cartella "**NO NAME**".

Ci sono diversi modi per farlo:

- a. Trascina e rilascia il file dalla cartella Download nella cartella "**NO NAME**".
- b. Tocca e tieni premuto il file finché non appare il menu contestuale, quindi seleziona "**Sposta**" dal menu in alto e tocca la cartella "**NO NAME**". Questo sposterà il file nella cartella designata.

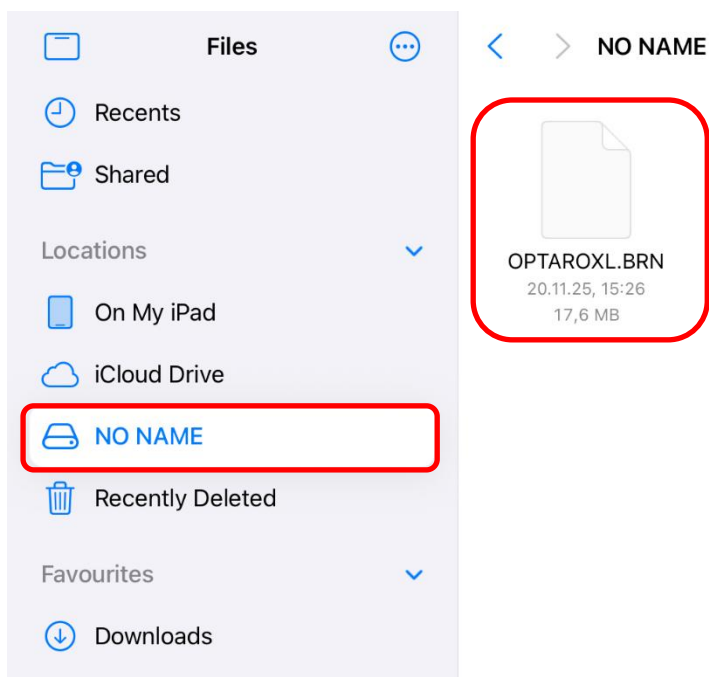

Importante:

Utilizzare solo il file di aggiornamento denominato **OPTAROXL.BRN**. Se il file è stato rinominato accidentalmente, duplicato o scaricato più volte, con conseguente modifica del nome del file, il dispositivo non riconoscerà l'aggiornamento.

7. Ora **scollega** il cavo USB-C corto dall'iPad.

Il LED lampeggerà in arancione per un breve periodo – questa operazione può richiedere fino a 3 minuti. Tuttavia, è anche possibile che il LED si spenga dopo pochi secondi e poi ricominci a lampeggiare. In questo caso, attendi ancora un po' per assicurarti che l'aggiornamento si completi con successo.

Il LED si spegnerà completamente dopo un po'. Il nuovo firmware è stato quindi installato con successo sull'optaro® XL.

8. **Apri** le impostazioni dell'app optaro® XL per verificare se l'aggiornamento è stato installato correttamente. La versione corrente del firmware viene visualizzata nella sezione **"Informazioni"**.

